

НАВІ ЛІПО СПРЕЙ

ЛІПОСОМАЛЬНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ СУХИХ ОЧЕЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАКРИТИХ АБО ВІДКРИТИХ ОЧАХ.
Спеціально розроблений для полегшення дискомфорту, викликаного сухістю очей.

СКЛАД:

Ліпосомальний розчин, гель алое вера 1%, екстракт ромашки, гіалуронат натрію, вітамін Е- ТПГС, дінатрій едетат, РНМВ в буферному ізотонічному розчині.

Не містить хлоргексидину, тимеросалу або хлориду бензалконію.

ОПИС:

СПРЕЙ НАВІ ЛІПО призначений для зовнішнього застосування на відкритих або закритих очах.

Ліпосоми відомі своєю властивістю відновлювати слізну плівку. Поєднання гіалуронату натрію та алое вера покращує зволожувальні властивості ліпосомального розчину, призначеного для полегшення станів сухого ока, який є природнім охолоджувальним, зволожувальним та живильним компонентом для шкіри.

ПОКАЗАННЯ:

СПРЕЙ НАВІ ЛІПО – це заспокійливий та зволожуючий аерозольний спрей, який:

Заспокоює, освіжає та забезпечує комфорт сухим та втомленим очам. Освіжає та захищає від втрати вологи. Забезпечує ефективне і довготривале полегшення сухим і втомленим очам. Відновлює фізіологічний стан поверхні ока та слізної системи.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Інструкція з використання на **ВІДКРИТИХ ОЧАХ:**

1. Збовтайте перед використанням.
2. При першому використанні, натисніть на насадку розпилювача 3-4 рази.
3. Тримайте пляшечку так, щоб ваш великий палець (або вказівний) був точно на дозаторі, будьте уважні, щоб не закрити вихідний отвір розпилювача.
4. Піднесіть розпилювач приблизно на 10 см від ока, він має знаходитись збоку від вашого обличчя.
5. Дивіться вперед так, щоб пляшечка знаходилась в межах поля зору, натисніть на дозатор так, щоб система зробила необхідне розпилення розчину.
6. Рекомендовано робити два вприскування за одне застосування, декілька разів на день за необхідності.
7. Продукт також можна застосовувати з контактними лінзами.

Інструкція з використання на **ЗАКРИТИХ ОЧАХ:**

1. Збовтайте перед використанням.

2. При першому використанні, натисніть насадку розпилювача 3-4 рази.
3. Тримайте пляшку так, щоб не закривати отвір для розпилення, приблизно на 10 см від закритих повік.
4. Нанесіть 1-2 рази на закриті повіки.
5. Одразу після застосування тримайте очі закритими декілька секунд.
6. Частота використання – за потреби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- У разі виникнення подразнення очей, припиніть використання продукту та зв'яжіться з лікарем.
- Не використовуйте, якщо у вас алергія на будь-який з компонентів продукту.
- Не торкайтесь поверхні ока розпилювачем.
- Зберігайте в місці, недоступному для дітей.
- Не ковтайте.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Використайте протягом 28 днів з моменту першого відкриття.
- Стерильний до першого відкриття.
- Після використання пляшку щільно закрийте.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Невідомі.

ЗБЕРІГАННЯ:

Тримайте подалі від джерел тепла. Зберігайте в сухому місці, при температурі між 5 та 35°C.

Форма випуску

Об'єм 10 мл.

Виробник

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» 03127, Україна, м.Київ, проспект Голосіївський,132.

Новакс Фарма, Коронадо, Проспект Фонв'єй 20, МС 98000 МОНАКО